



DI/PROM/1/6/2024

## Instrumenty polerujące

**edenta** |  

### Dystrybutor w Polsce:

Dental ID Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 4a  
85-758 Bydgoszcz

### Kontakt:

[www.dentalid.pl](http://www.dentalid.pl)  
tel. +48 533 352 147  
[zamowienia@dentalid.pl](mailto:zamowienia@dentalid.pl)



## Zalecenia dotyczące dezynfekcji i sterylizacji wersja skrócona

- Instrumenty w momencie zakupu są niesterylne i wymagają pełnego cyklu dezynfekcji i sterylizacji przed pierwszym użyciem.
- Polerki należy dezynfekować wyłącznie w płynach przeznaczonych do polerek gumowych i syntetycznych/ silikonowych nie zawierających alkoholu.
- Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta płynu co do stężenia oraz czasu procesu dezynfekcji.
- Płynem zalecanym przez producenta jest ID212 firmy Dürr Dental - 2% roztwór, czas dezynfekcji 5 min w pojemniku lub 1 min w myjce ultradźwiękowej.
- Po zastosowaniu płynu dezynfekującego należy opłukać instrumenty w wodzie destylowanej.
- Sterylizacja w autoklawie - pełny cykl 5 min w temperaturze 134°C.
- Należy unikać zgniecenia w torebkach do sterylizacji.
- Myjka ultradźwiękowa - nie należy przekraczać temperatury 42°C.